

BIOLIMP

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA
SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

GERMI BIO



BIOLIMP

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

GERMI BIO

FINALIDADE: Usado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes hospitalares.
PROPRIEDADES: Ação bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Não é corrosivo e não irrita a pele.
MODO DE USAR: Diluir em água na proporção de 1:100. Aplicar sobre a superfície a ser desinfetada e deixar agir por 10 minutos.
PRECAUÇÕES: Evitar contato com os olhos e mucosas. Usar equipamento de proteção individual (EPI).
ARMAZENAMENTO: Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

BIOLIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME/MS
R. São Paulo, 100 - Jd. São Paulo - CEP: 71.600-000 - Brasília, DF
Fone: (61) 3425-3920 - Fax: (61) 3425-3920
www.biolimpsms.ind.br

SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente
(61) 3425-3920
CIVIL: 08h às 18h

LOTE: 1/18
FABR: 01/2021
VALIDADE: 2 ANOS
Produto Não Fluido 0412
ANVISA MS Nº 341.132/009

RECYCLABLE BIODEGRADABLE
LINHA HOSPITALAR
5L

Imagens meramente ilustrativas.

LINHA HOSPITALAR

BIOLIMP



DESINFETANTE HOSPITALAR PARA
SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

GERMI BIO

DESCRIÇÃO:

GERMI BIO é um produto líquido incolor a levemente amarelado, composto por uma mistura de quaternários de amônio com biguanida.

Possui ótimo poder bactericida e fungicida, sendo eficaz frente às cepas Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa. Tem concentração mínima de 1,0% de cloro ativo. Não espuma e é facilmente removido nos enxágues.

INDICAÇÕES DE USO:

- ✓ Desinfecção de superfícies fixas em hospitais como pisos, paredes, equipamentos e mobiliários. Ideal para casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos e posto de saúde.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para desinfecção comum: Aplicar o produto com ajuda de um pano ou mop deixando agir de 2 a 5 minutos.

Para desinfecção de artigos não críticos que tenham contato direto com a pele íntegra do paciente: Aplicar a solução e deixar secar naturalmente. Exemplos de uso: estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro, etc.

- ⚠ Nunca aplicar o produto diretamente na superfícies dos eletrônicos, sempre aplicar no pano ou mop e depois na superfície a ser limpa e desinfetada.

- ⚠ Não requer enxágue.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



A	-	5Kg (x4 un.)	-	-	-
---	---	-----------------	---	---	---

ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO

- 🚫 Evitar contato direto com o produto
- 🚫 Evitar a inalação do produto
- 🧼 Lavar e secar as mãos após o manuseio

- ⚠ Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- ☁ Manter em local fresco e arejado